

FORMADES

FLÄCHENDESINFEKTION



WIPES SYSTEM

Vliestuch-Spendersystem / Vliestücher

- separat erhältlich: nachfüllbares Vliestuch-Spendersystem und Tuchrolle aus hochwertigen Vliestüchern
- sparsame Einzelblattentnahme

Anwendung

1. Handschuhe anziehen
2. Vor Befüllung mit einer neuen Tuchrolle muss der Vliestuchspender gründlich aufbereitet werden
3. Desinfektionsmittel und Tuchreste entfernen
4. Reinigung des Spenders durch Auswischen mit einem getränkten Reinigungstuch oder Ausspülen mit heißem Wasser (70°C), anschließend abtrocknen lassen (Spülmaschinengeeignet bis 70°C)
5. Desinfektion aller Oberflächen des Spenders einschließlich dem Deckel und der Entnahmeöffnung mit einem Schnelldesinfektionsmittel oder Schnelldesinfektionstuch (z. B. Formades Rapid Pur, Formades Wipes), anschließend abtrocknen lassen

Einsatzbereich

Zur Verwendung bei kompatiblen FORMADES Desinfektionsprodukten auf nicht-porösen Oberflächen mit mechanischer Einwirkung in Krankenhäusern, in medizinischen Einrichtungen in Schulen, Kindergärten sowie in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen. Nur für den professionellen Gebrauch.

6. Vliestuchrolle aus der Verpackung nehmen und auf desinfiziertem Deckel abstellen Vliestuchrolle in gereinigten, desinfizierten und abgetrocknetem Feuchttuchspender einsetzen
7. Konzentrat mit entsprechender Menge Wasser / gebrauchsfertige Lösung einfüllen
8. Vliestuch von unten durch die sternförmige Entnahmeöffnung führen und Deckel aufsetzen, 1. Tuch verwerfen
9. beigefügtes Chargenetikett ausfüllen und aufkleben

Hinweise

Kompatibilität mit FORMADES Desinfektionsprodukt, Verfallsdatum, Anwendungskonzentration und Einwirkzeit bitte entsprechendem Produktblatt entnehmen.

Standzeit getränkte Tücher im Feuchttuchspender : 28 Tage

Gebinde	Inhalt	VE	Art.Nr.	PZN
Vliestuchspender	Eimer für 90 Tücher	1	65660	16928951
Vliestücher	90 Tücher (20 x 30 cm)	6	65610	16929028

Stand 04/2021

Alle Angaben unserer Produktdatenblätter entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Weitere Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Vertrieb durch:
unizell Medicare GmbH
Pohnsdorfer Str. 3
23611 Bad Schwartau

Telefon: 0451 - 39 89 00
Telefax: 0451 - 39 39 93
E-mail: info@unizell.de

Hersteller:
DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Tanusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080

unizell